

PACK PRACTI-BABY



ENTHÄLT

1 Practi-baby, 1 Anleitung, 4 Lungen, 2 Ventile und 1 Transporttasche

GARANTIE-ZERTIFIKAT



Dieses Produkt hat erfolgreich die strengsten Qualitätskontrollen durchlaufen, bevor es das Werk verlässt. Dennoch kann es zu Fehlfunktion aufgrund von Montage und / oder Komponentenfehlern kommen. Lesen Sie in diesem Fall die Garantiebestimmungen und kontaktieren Sie Ihren Händler.

ENFAVI, SL gewährt zwei Jahre Garantie ab Rechnungsdatum.

Wenn es während der Laufzeit der Garantie zu Produktfehlern kommt, die auf den Herstellungsprozess oder Materialversagen zurückzuführen sind, muss der Verbraucher den Händler innerhalb von 10 Werktagen informieren, nachdem er den Defekt bemerkt hat. Nach dem Ermessen des Händlers wird das Produkt entweder repariert oder ersetzt.

GARANTIEBEDINGUNGEN:

Details und Dokumentation: Sie benötigen eine Kopie der Rechnung über den Kauf Ihres Produktes, um eine Garantiegewährleistung zu haben. Neben den Produktmerkmalen muss die Rechnung die folgenden Angaben enthalten: Name und Anschrift des Käufers.

Ausschlüsse: Diese Garantie schließt speziell die folgenden Punkte aus:

-Schäden und/oder Mängel am Produkt nach nicht sachgerechter Verwendung, oder Fahrlässigkeit des Benutzers, einschließlich der

Verwendung des Produkts für andere Zwecke als dem bestimmungsgemäßen Gebrauch.

-Beschädigung und/oder Mängel durch den Einsatz von säurehaltigen Flüssigkeiten wie Zitrone oder anderen schädlichen Chemikalien oder ätzenden Stoffen.

-Schäden und/oder Mängel durch unsachgemäße Wartung oder mangelnde Reinigung.

-Beschädigung und / oder Mängel durch die Verwendung von Ersatzteilen, die nicht vom Hersteller der Puppe kommen.

Geographische Abdeckung: Die Garantie gilt für alle Länder, in denen das Produkt von einem Händler vertrieben wird, ENFAVI, S. L.

Garantie verfällt

- In Fällen von Schäden, die durch Reparaturen durch andere Personen als von autorisierten Servicestellen von ENFAVI S. L. entstehen und/oder wenn andere als die Originalteile, hergestellt von ENFAVI S. L., oder Zubehör der Puppe verwendet werden.

- Durch die Veränderung der Daten auf der Rechnung, dem Kassenbon oder der Originalverpackung.

ENFAVI S. L. TEL. +34 965 554 708 / FAX +34 965 551 312
C/ Avila, 2 Pol. Ind. L'Alfaç III - 03440 Ibi - Alicante - SPAIN
www.practiman.com - info@practiman.com - international@practiman.com

CPR MANIKIN PRACTI-BABY

DIE WICHTIGSTEN EIGENSCHAFTEN UND FUNKTIONEN



PRACTI-BABY - DIE REALISTISCHE PÄDIATRISCHE ÜBUNGSPUPPE

Durch ihr Aussehen, Gewicht, ihre Größe und Bewegungen ermöglicht Practi-Baby die Durchführung einer korrekten pädiatrischen CPR und kann leicht an die jeweiligen Schulungsbedürfnisse angepasst werden.



ÜBUNG MIT REALISTISCHER ATMUNG


Ausgezeichnetes Ergebnis während der Übung mit Baby Beatmungsbeutel

Die Bewegung des Kopfes ermöglicht eine korrekte Atmungsübung.

AKUSTISCHE RÜCKMELDUNG

Durch den Wahlschalter haben Sie die Möglichkeit, die Übung mit oder ohne Klick auszuführen.

WEITERE VORTEILE VON PRACTI-BABY

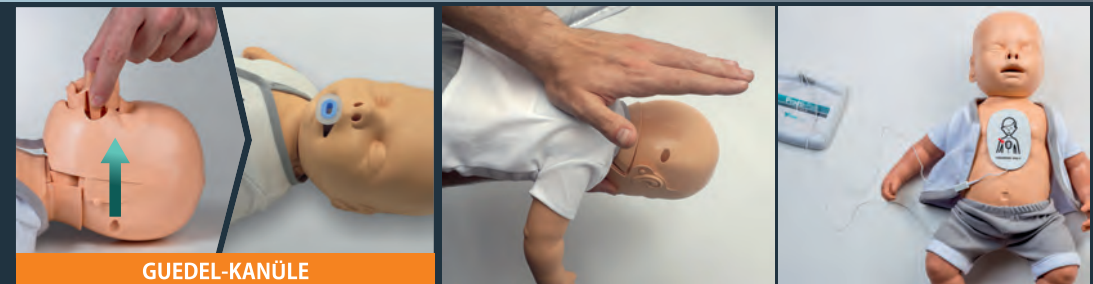

GUEDEL-KANÜLE

Zur Übung mit der Guedel-Kanüle die Maske ohne Ventil platzieren.

CHOKING PRACTICE

AED-SCHULUNG

Die Verwendung von Defi-Paddles hinterlässt keine Rückstände auf der Haut.



Novidion GmbH • Fuggerstr.30 • 51149 Köln
Tel.: 02203 988 52 00 Fax: 02203 988 52 06
info@novidion.de www.pulox.de

PRACTI-BABY-MONTAGE



Entfernen Sie die Rumpfhaut.



Entfernen Sie die Gesichtshaut.



Legen Sie die Lunge unter das Kinn.



Schließen Sie die Lunge an das Ventil an.



Stellen Sie sicher, dass das Ventil richtig am Kopf befestigt ist.



Legen Sie die Lunge auf die Brust.



Platzieren Sie die Gesichtshaut und stellen Sie sicher, dass Nase, Mund und die Lasche am oberen Kopfe richtig zusammenpassen.



Platzieren Sie die Torsohaut auf dem Rumpf und befestigen Sie diese an den Stiften.

EMPFEHLUNGEN FÜR DIE REINIGUNG UND DESINFEKTION

Um eine maximale Hygiene zu gewährleisten, empfiehlt der Hersteller die Reinigung von Practi-Baby nach jedem Gebrauch unter Einhaltung der folgenden Anweisungen:



Es ist notwendig, die Übungspuppe zu reinigen, indem man die Gesichtshaut nach jeder Übung vom Kopf trennt und die Lippen und das Gesicht desinfiziert.



Für eine vollständige Desinfektion tauchen Sie die Gesichtshaut in einen Behälter mit Desinfektionsmittel ein, reinigen Sie sie sorgfältig und lassen Sie sie für den ordnungsgemäßen Gebrauch trocken.



Nach jedem Gebrauch sollte das Ventil von Practi-Baby desinfiziert und für den ordnungsgemäßen Betrieb getrocknet werden.



Die Lunge von Practi-Baby ist begrenzt wiederverwertbar und eignet sich für eine Trainingseinheit mit einer Gruppe von mehreren Personen, ohne dass sie gewechselt werden muss. Wenn sich der Brustkorb während der Übung nicht mehr hebt, überprüfen Sie, ob die Lunge nass geworden ist. Falls dem so ist, muss sie durch eine neue ersetzt werden.

ERSATZTEILE FÜR PRACTI-BABY



LUNGE
(Ref. SP-001 (PB))



VENTIL
(Ref. SP-002 (PB))



GESICHTSHAUT
(Ref. Face-PB)



TORSOHAUT
(Ref. Chest-PB)

SCHUTZ WÄHREND DER CPR-ÜBUNG



Für zusätzlichen Schutz während der Schulung werden Atemschutzmasken verwendet.



BEÄTMRUNGSTUCH
Spenderbox mit 50 Stück



DESINFIZIERUNGSTÜCHER
Spenderbox mit 100 Stück

Verwenden Sie Desinfektionstücher, um eine korrekte Reinigung der Übungspuppe zu gewährleisten.