

smartCRUTCH™

Vertrieb durch:
Novidion GmbH
Fuggerstr 30
DE-51149

Tel.: +49 (0)2203 988 520 0
Fax: +49 (0)2203 988 520 6

E-Mail: info@novidion.de

www.smartcrutch.de

smartCRUTCH™




Die revolutionäre **smartCRUTCH™** Krücke vereint Sicherheit, Komfort und Design

www.smartcrutch.de



SmartCRUTCH Einführung

1. Lösen Sie die Flügelmutter (A) soweit, dass die Ellenbogenauflage frei an der Achse rotieren kann.
2. Drehen Sie die Armlehne (8), um etwa 45° (wie in Fig. 2 abgebildet). Ziehen Sie jetzt die Flügelmutter fest. Stellen Sie sicher, dass die Verriegelung richtig eingerastet ist. Dies sollte eine angemessene Ausgangsposition für die Verwendung der **smartCRUTCH** Krücke sein. Passen Sie den Winkel der Achse regelmäßig an, um eine Entlastung der Arme und Hände zu unterstützen.
3. Legen Sie Ihren Ellenbogen in die Auflage (wie in Fig. 3 abgebildet).
4. Passen Sie die Armlänge so an, dass wenn Ihr Ellenbogen ruhig in der Auflage liegt, Ihre Hand bequem den Handgriff umschließt. Setzen Sie die Schraube wieder auf und ziehen Sie die Flügelmutter richtig fest (Fig. 4).
5. Stehen Sie gerade und halten Sie die Krücke so, wie Sie sie auch verwenden würden.
6. Der Fuß der Krücke sollte den Boden berühren und Ihr Ellenbogen sollten bequem in der hierfür vorgesehenen Auflage liegen.
7. Passen Sie die Höhenverstellung entsprechend Ihrer Körpergröße an (wie in Fig. 5 abgebildet).
8. Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 7 auch mit der zweiten Krücke.
9. Sollte die **smartCRUTCH** Krücke Druck ausüben und Schmerzen an den Händen oder Unterarmen zufolge haben, verändern Sie den Winkel in eine Position, die bequemer für Sie ist (wie in Fig. 2 dargestellt).

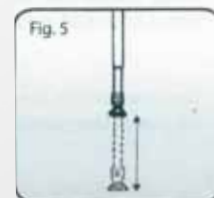

Anwenderhinweis

Die Krücken wurden speziell entwickelt, um Menschen mit Gehbehinderungen eine höhere Sicherheit und Stabilität beim Laufen ermöglichen. Sie sind sowohl für den Einsatz im Haus als auch auf der Straße geeignet.

Manipulationswarnung

Manipulationen bzw. technische Veränderungen an der Krücke, jeglicher Art, sind untersagt.

Einstellungswarnungen

Achten Sie immer darauf, dass Sie bei der erstmaligen Verwendung der Krücken von einer qualifizierten Fachkraft bei der Einstellung unterstützt werden (z.B. Ihr behandelnder Arzt). Beachten Sie diese Anleitung um sicherzustellen, dass alle Einstellungen korrekt sind. Vergewissern Sie sich, dass alle einstellbaren Teile fest und sicher sind. Stellen Sie sicher, dass die Einrastfunktion für die Höhenverstellung sicher eingerastet ist, bevor Sie die Krücke belasten.

Wartung und Inspektion

Prüfen Sie die Krücke vor der Verwendung auf eventuelle Schäden (Risse im Metall, Verformungen, Löcher oder lose Schrauben/Muttern oder andere lose Teile). Prüfen Sie außerdem, ob der Fuß fest am unteren Ende der Krücke befestigt ist. Überprüfen Sie die Krücken regelmäßig auf Verschleiß!

Ersatzteile

Für eine vollständige Übersicht an Ersatzteilen, wenden Sie sich bitte an Ihren smartCRUTCH Händler.

Rutschige Flächen und Treppen

Verwenden Sie die Krücken nicht auf rutschigen Untergründen wie nasse Fliesen, Schlamm/Matsch oder Eis, da es sonst zu Verletzungen durch Rutschgefahr kommen kann. Wenn Sie die Treppe hinauf gehen, plazieren Sie zuerst Ihren Fuß auf der Treppe und erst wenn Sie einen sicheren und festen Halt haben, führen Sie die Krücke auf die Stufen. Wenn Sie die Treppe hinunter gehen, stützen Sie die Krücken zuerst auf die Stufe und sobald Sie einen festen und sicheren Halt haben, führen Sie den Fuß auf die gleiche Stufe hinterher.

Verwendungseinschränkung

Unter normalen Umständen sind die smartCRUTCH Krücken bis zu einem Körpergewicht von 120 kg belastbar. Sie sind für Anwender von 1,52m bis 1,95m geeignet.

Lagerung

Die smartCRUTCH sollten keinen extremen Witterungsbedingungen ausgesetzt werden und sollten nicht für längere Zeit der Sonne ausgesetzt sein (dazu zählt ebenfalls intensiver Sonneneinfall durch ein Fenster im Haus). Hierdurch kann es zur vorzeitiger Materialabnutzung kommen.

Garantie

Die smartCRUTCH haben eine Garantie von 12 Monaten (bei normaler Verwendung). Bei missbräuchlicher Verwendung erlischt die Garantie.

